

ERGO
CONCEPT



ERGO ATLAS

NUOVO

Sistema
Rivoluzionario!



ERGO
ATLAS 40

Facilmente rimovibile



ERGO
ATLAS 40 ISOFIX

Adatto per baule piatto

IL PRIMO SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PER BAGAGLIAIO RIMOVIBILE

Nessun foro o danno al veicolo

Movimentazione senza sforzo grazie all'impianto elettrico

SCHEDA PRODOTTO

Installazione facile

Può essere rimosso dal bagagliaio senza sforzo

ERGO ATLAS 40



Base di fissaggio

ERGO ATLAS 40 ISOFIX



Base di fissaggio



Piantone

Gestione Controllo da remoto



Opzione Pacchetto
ERGO ATLAS



+



+



Batteria E08L ERGOCONCEPT
con adattatore e caricabatterie

Utilizzo dell'ERGO ATLAS

PASSO 1 >>

Ruotare il piantone verso all'esterno del bagagliaio fino a la posizione più adatta. Se necessario, utilizzare il paranco.



<< PASSO 2

Collegare il cavo di alimentazione dall'ERGO ATLAS alla tua sedia o scooter ERGOCONCEPT. Per le sedie BR7, BR8 e BR8 Explorer, collegare la gru alla batteria della sedia e non al joystick (o direttamente alla batteria se Pack ERGO ATLAS).



PASSO 3 >>

Utilizzare il telecomando per abbassare il gancio, quindi fissarlo saldamente nella posizione appropriata sulla sedia o il tuo scooter.



<< PASSO 4

Solleverare il carico fino alla soglia dal bagagliaio, quindi ruotare con attenzione la staffa verso l'interno del veicolo, prima di abbassare il carico.



Caratteristiche tecniche

40 kg
carico

Piantone completamente smontabile



ERGO
ATLAS 40

Lunghezza totale: 88 cm
Larghezza totale: 60 cm
Struttura: 5,4kg
Albero: 5,6 kg

ERGO
ATLAS 40 ISOFIX

Profondità regolabile: da 62 a 90 cm
Regolabile in larghezza: da 85 a 122 cm
Struttura: 8,5kg
Albero 5,6 kg

Peso (esclusa batteria)	Albero 5,6 kg
Altezza del piantone	Da 65 a 105 cm
Carico massimo	40 kg
Compatibilità del bagagliaio	DA VERIFICARE PRIMA DELL'ACQUISTO, a seconda del veicolo.

ALIMENTAZIONE

Ergo Atlas

Tramite cavo di alimentazione in dotazione, collegato direttamente alla vostra sedia o scooter ERGOCONCEPT. Per le sedie BR7, BR8 e BR8 Explorer, collegare la gru alla batteria della sedia e non al joystick.

Pack Ergo Atlas

Collegamento della batteria incluso nel pacchetto Ergo Atlas (Rif.8E03).
ATTENZIONE! Usa il tuo Ergo Atlas Pack solo con dispositivi elettrici, batterie e caricabatterie Compatibile con ERGOCONCEPT.

Scopri tutti i prodotti ErgoConcept sur www.ergoconcept.net/it/

ERGOCONCEPT Italia S.R.L. VIA LEONE XIII N 14 - 20145 Milano (MI) - Italia / CF/P.IVA: 13532420968

ERGOCONCEPT - 35 rue du Petit Bois - ZAC Les Platières - Edificio D - 69440 MORNANT - France

Tel. : **+33 477 40 09 97** - Fax : +33 426 29 90 11 - E-mail : contact@ergoconcept.net - www.ergoconcept.net/it

R.C.S LYON : 803 494 822 - Capitale sociale : 60 000 € - Immagini non contrattuali soggette a modifiche.

