

ERGO
CONCEPT



ERGO ATLAS

NOUVEAU

Système
révolutionnaire !



ERGO
ATLAS 40

Facilement démontable



ERGO
ATLAS 40 *ISOFIX*

Adaptation coffre plat

LA 1^{ÈRE} GRUE DE COFFRE AMOVIBLE

Sans percer ou endommager le coffre

Manipulation sans effort par système électrique

FICHE PRODUIT

Installation Facile

Peut être retiré du coffre sans effort

ERGO ATLAS 40



Base de fixation

ERGO ATLAS 40 ISOFIX




Base de fixation



Mât / Potence

Manipulation télécommandée

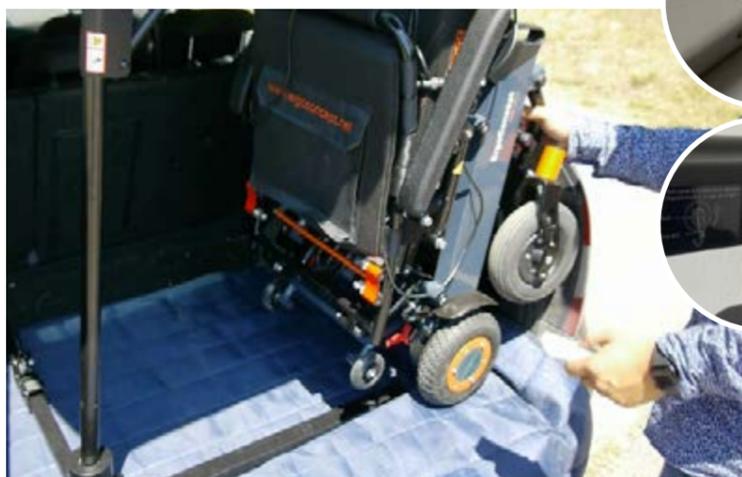

Option Pack ERGO ATLAS



+



+



Batterie E08L ERGOCONCEPT
avec adaptateur et chargeur

Utilisation du ERGO ATLAS

ETAPE 1 »

Faire pivoter la mât vers l'extérieur du coffre jusqu'à la position la plus adéquate. Si nécessaire, utilisez le palan.



« ETAPE 2

Branchez le câble d'alimentation du ERGO ATLAS à votre fauteuil ou scooter ERGOCONCEPT. Pour les fauteuils BR7, BR8 et BR8 Explorer, brancher la grue sur la batterie du fauteuil et non sur le joystick (ou directement à la batterie si Pack ERGO ATLAS).



ETAPE 3 »

Utilisez la télécommande pour abaisser le crochet puis attachez-le solidement à l'endroit approprié sur votre fauteuil ou votre scooter.



« ETAPE 4

Lever la charge jusqu'au seuil du coffre puis faites pivoter avec précaution la potence vers l'intérieur du véhicule, avant de faire descendre la charge.



Caractéristiques techniques



▶ Scannez-moi !

40 kg
de charge

Mât entièrement
démontable



ERGO
ATLAS 40

Longueur totale : 88 cm
Largeur totale : 60 cm
Structure : 5,4 kg
Mât : 5,6 kg



ERGO
ATLAS 40 ISOFIX

Réglable en profondeur : de 62 à 90 cm
Réglable en largeur : de 85 à 122 cm
Structure : 8,5 kg
Mât 5,6 kg

Poids (hors batterie)	Mât 5,6 kg
Hauteur du mât	De 65 à 105 cm
Charge max.	40 kg
Compatibilité coffre	À VÉRIFIER AVANT ACHAT, selon votre véhicule.

ALIMENTATION	
Ergo Atlas	Par câble d'alimentation fourni, directement branché sur votre fauteuil ou scooter ERGOCONCEPT; Pour les fauteuils BR7, BR8 et BR8 Explorer, brancher la grue sur la batterie du fauteuil et non sur le joystick
Pack Ergo Atlas	Branchement sur batterie incluse dans le Pack Ergo Atlas (Réf.8E03). ATTENTION ! Utilisez votre Pack ERGO ATLAS uniquement avec les dispositifs électriques, batteries et chargeurs ERGOCONCEPT compatibles.

Voir tous les produits ErgoConcept sur www.ergoconcept.net

ERGOCONCEPT - 35, rue du Petit Bois - ZAC Les Platières - Bâtiment D - 69440 MORNANT - France

Tél : **+33 477 40 09 97** - Fax : +33 426 29 90 11 - Email : contact@ergoconcept.net - www.ergoconcept.net

R.C.S LYON : 803 494 822 - Capital social : 60 000 € - Images non contractuelles soumises à modifications.

