

Freeli

Manuale d'uso

FREELI



Sommario

Sommario	2
Descrizione del Freeli	5
Sede	9
Braccioli	11
Il poggiapiedi	12
Ruote	13
Batteria	14
Joystick	15
Interferenze elettromagnetiche	16
Trasporto	16
Caratteristiche generali	17
Manutenzione	18
Garanzia	18

Prefazione

Per la sicurezza del bambino, leggere attentamente il presente documento prima di utilizzare il prodotto.

Assicurarsi di rispettare le seguenti precauzioni:

1. Chiedete a personale specializzato di spiegarvi come utilizzare il prodotto in modo sicuro.
2. Se avete domande sul prodotto o problemi, rivolgetevi al personale specializzato.
3. Segnala qualsiasi incidente grave relativo al prodotto al produttore.
4. Sul prodotto sono montati piccoli elementi staccabili senza attrezzi, aumentando il rischio di soffocamento, è importante assicurarsi che non vengano ingeriti, soprattutto da bambini piccoli.
5. Non è consentito modificare la sedia in alcun modo senza l'autorizzazione scritta del produttore, poiché ciò potrebbe avere gravi conseguenze sulla sicurezza.
6. Freeli è una sedia a rotelle elettrica per bambini e richiede la supervisione di un adulto in ogni momento per garantire un uso sicuro e appropriato.

Non è consigliabile utilizzare la poltrona se si osserva uno dei seguenti:

1. Parti della sedia sembrano deformi o rotte.
2. Si nota rumori insoliti.
3. Ritenete che l'uso presenti un rischio per la sicurezza dell'utente o delle persone nelle vicinanze

La versione descritta nel manuale d'uso può essere soggetta a modifiche tecniche.

Si consiglia di conservare questo documento per ulteriori riferimenti. Se necessario, contattare il rivenditore per una nuova documentazione. Una versione digitale esiste sul sito del produttore.

L'utente è responsabile dell'uso sicuro del prodotto e deve attenersi alle istruzioni riportate nelle istruzioni per l'uso, al fine di garantire un funzionamento sicuro. La responsabilità finale di prevenire gli incidenti legati all'uso del prodotto spetta all'utente.

È indispensabile che un adulto controlli attentamente l'uso della sedia a rotelle ed sia pronto ad intervenire in caso di potenziale pericolo. Si consiglia inoltre di stare vicino al bambino fino a quando non ha imparato a usare il Freeli.

È anche importante controllare l'ambiente del Freeli per eventuali pericoli potenziali come angoli, rischi di bloccaggio, cadute e schiacciamento.

La sedia a rotelle è bassa, quindi c'è il rischio di incidenti o lesioni. Controllate bene gli spazi, curandovi dei potenziali rischi, in particolare per la testa del bambino.

Rivolgersi a un professionista del settore sanitario per definire la posizione di seduta ottimale per il bambino e per selezionare e installare il joystick.

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il Freeli e prendere nota delle avvertenze di sicurezza indicate dal simbolo

Descrizione del Freeli

Freeli è progettato per essere utilizzato su un terreno stabile sia all'interno che all'esterno. La sedia a rotelle può trasportare una sola persona.

Si consiglia di controllare le regolazioni della poltrona almeno una volta all'anno per garantire un'attrezzatura ottimale.

Freeli è una sedia a rotelle elettrica, progettata appositamente per i bambini dai 18 mesi ai 7 anni. Queste età sono indicative, l'uso dipenderà dall'altezza e dal peso del bambino.

Panoramica:



1	2	3	4	5	6	7	8
<i>poggiatesta</i>	<i>schienale</i>	<i>Joystick</i>	<i>poggiapiedi</i>	<i>terza parte (opzione)</i>	<i>braccioli</i>	<i>batteria</i>	<i>ruote motrici</i>

È possibile personalizzare l'attrezzatura di base in funzione delle esigenze individuali dell'utente grazie ad una vasta scelta di opzioni che possono essere consultate sul buono d'ordine e nel catalogo accessori disponibile presso il proprio rivenditore.

Se in combinazione con il Freeli vengono utilizzati accessori di altri produttori, è importante rispettare tutte le disposizioni di sicurezza e i requisiti legali vigenti. ELI INNOVATION non può essere ritenuta responsabile in caso di combinazione con dispositivi medici o accessori di altri produttori che non fanno parte del suo sistema modulare.

Sono incluse anche le istruzioni per la manutenzione, la garanzia di efficacia e sicurezza del prodotto. (escluso negligenza, uso improprio o abuso).

Specifiche tecniche:

Larghezza del sedile: 235 - 285mm

Profondità di seduta: 155 - 345mm

Angolo dello schienale: da 90 a 97°

Basculante: 0 - 15°

Peso max. dell'utente: 35kg

Peso totale della poltrona: 40kg

Velocità massima: 6km/h

Ambiente

Per un funzionamento ottimale, si consiglia di utilizzare il Freeli su terreni rigidi e pendii leggeri. È importante non tentare di scalare pendenze superiori ai 5°. Rispettare le istruzioni per evitare il rischio che la Freeli scivoli o si rovesci se la pendenza è troppo ripida.

Per garantire una discesa sicura, è necessario ridurre la velocità in base alla pendenza.

Velocità

È fondamentale considerare la velocità adeguata in funzione delle competenze e dell'ambiente in cui l'utente si muove. Se si utilizza il Freeli all'interno o in spazi ristretti, è possibile guidarlo a velocità ridotta per consentire al bambino di muoversi facilmente attorno agli ostacoli. Nei casi in cui l'ambiente lo consente, è possibile guidare a una velocità più elevata.

La sedia si ferma rilasciando il joystick.

In caso di emergenza che richieda l'arresto immediato del Freeli, è possibile scegliere tra diverse opzioni, ovvero spegnere l'interruttore di alimentazione situato sul retro o utilizzare il comando di terze parti quando esiste. Tuttavia, il modo più veloce è quello di rimuovere la mano del bambino dal joystick.

È importante tenere conto della temperatura superficiale delle parti a contatto con il bambino quando si utilizza la sedia a rotelle, perché può variare notevolmente in presenza di fonti di calore o freddo, soprattutto in caso di esposizione al sole o a condizioni di gelo. Si raccomanda inoltre di non utilizzare il Freeli in caso di pioggia o di lasciarlo all'aperto esposto alla pioggia. Inoltre, è importante non guidare il Freeli in pozzanghere.

Guida in pendenza

Le distanze di arresto sulle pendenze possono essere significativamente maggiori rispetto ai terreni orizzontali.

Guida sui marciapiedi o vicino ai gradini

È responsabilità dell'accompagnatore di prendere il controllo della sedia in situazioni che presentano pericoli evidenti come marciapiedi stretti, vicino a strade, laghi d'acqua, scale ecc...

Non tentare di scendere dal marciapiede con la sedia a rotelle, utilizzare gli accessi adatti.

Attraversare la strada

Se necessario, l'accompagnatore deve assumere il pieno controllo della sedia utilizzando il comando di terze parti o la modalità " Free Wheel " per spingere manualmente la sedia.

Altri bambini

È importante garantire la sicurezza degli altri bambini nelle vicinanze del Freeli, prestando particolare attenzione per evitare collisioni o il rischio di schiacciamento delle mani e dei piedi. È fondamentale essere vigili in presenza di piccoli e striscianti che potrebbero trovarsi nelle vicinanze del Freeli. È importante tenere sotto controllo tutti i bambini che si trovano nelle vicinanze del Freeli per evitare il rischio di lesioni o incidenti. Assicurati di non lasciare che i bambini strisciano o salgano sul Freeli.

Animali

Prendere ulteriori precauzioni con il Freeli quando sono presenti animali domestici.

Stoccaggio

Assicurarsi di raccomandare lo stoccaggio in un ambiente asciutto lontano da fonti di calore o freddo.


Sede

Non provare mai a regolare la posizione seduta quando il bambino è seduto sul sedile perché c'è il rischio di rimanere bloccati e/ o feriti.


Per la sicurezza del bambino, utilizzare sempre la cintura e l'imbracatura fornite. Regolare le cinghie per garantire una vestibilità aderente. Se non sei sicuro, contatta il personale medico che segue tuo figlio o il rivenditore.

Il sedile è progettato per essere regolabile in modo che il bambino sia in una posizione funzionale e confortevole. La chiave per aiutare il tuo bambino a godere della sua mobilità è che si senta al sicuro. Si consiglia di consultare un medico per consigli sulla posizione ottimale per il vostro bambino.

La profondità del sedile si regola tirando i tiratori su entrambi i lati del sedile. Aprire le ali laterali e far scorrere il sedile nella posizione desiderata e rilasciare i tiranti nei fori di posizione corrispondenti.

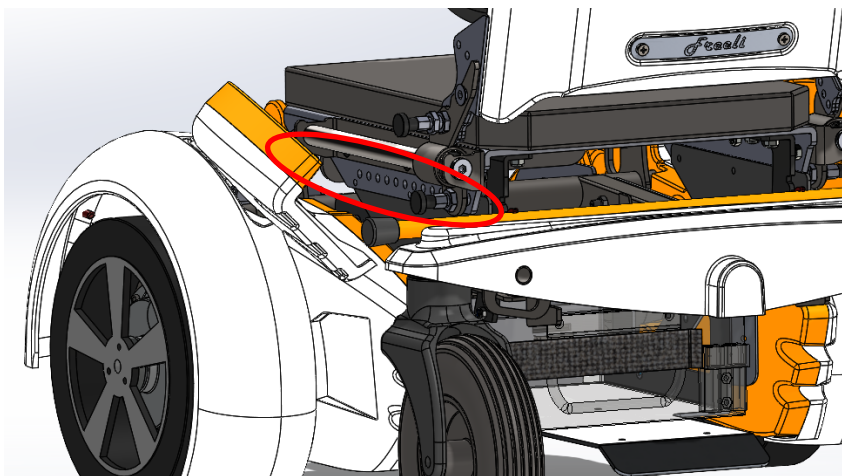


L'angolo del sedile è regolabile con le maniglie che si trovano nella parte posteriore di ogni estremità della sedia.

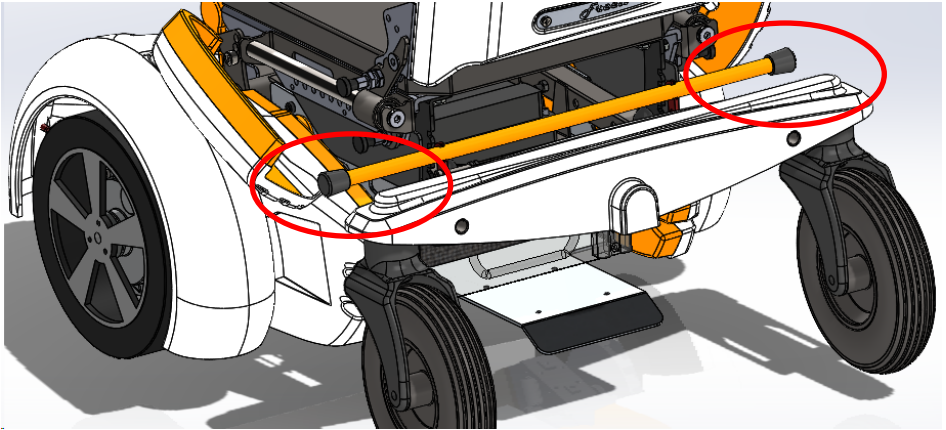

Per diminuire l'angolo del sedile, tirare semplicemente il sedile verso l'alto. Potete aiutarvi a questo dal poggiatesta. Per aumentare l'angolo, tenere premuto il sedile e tirare una delle maniglie verso la parte posteriore. Rilasciare la presa quando si raggiunge la posizione desiderata.


È possibile modificare l'angolo dello schienale tirando i tiratori su entrambi i lati del sedile. Spostare il sedile nella posizione desiderata e rilasciare i tiranti nei fori di posizione corrispondenti. Hai la possibilità di ribaltare lo schienale del sedile utilizzando il foro di posizionamento più avanzato.

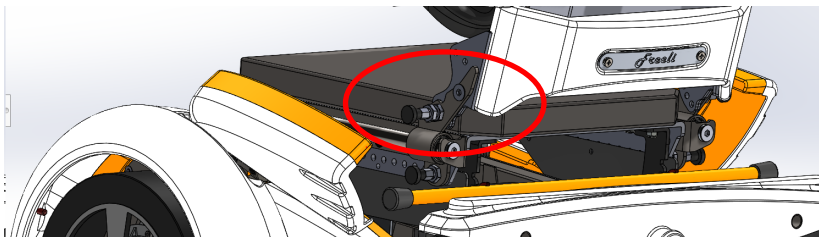

È importante monitorare il tempo di utilizzo del Freeli e adattarlo costantemente al comfort e alla postura del bambino.


Poggiatesta

È possibile regolare l'altezza del poggiatesta rilasciando la vite a mano nera, ruotando in senso antiorario. Quindi regolare l'altezza desiderata e stringere la vite.

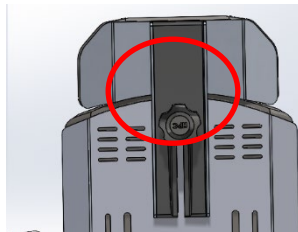

Braccioli

Fate attenzione se decidete di regolare i braccioli e le calotte del tronco mentre il bambino è seduto nel Freeli. Braccioli e cunei sono fissati con viti a mano e scorrono lungo le rotaie.

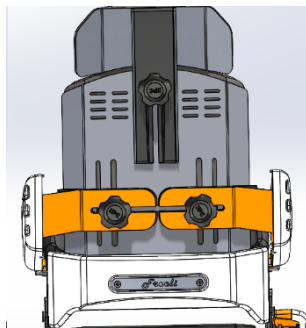


L'altezza e la larghezza dei braccioli e delle tacchette si regolano svitando leggermente le viti a mano e facendo scorrere nelle fessure previste. Assicuratevi di riavvitare per proteggere il tutto.

Il poggiapiedi

Assicurati che i piedi del tuo bambino siano posizionati correttamente sul poggiapiedi. Se posizionati in avanti o di lato, potrebbero causare lesioni. Fate attenzione a non ferirvi se i bambini tentano di sollevarsi sul poggiapiedi. È possibile dotare il poggiapiedi di cinghie per mantenere i piedi del bambino in sicurezza.

Il poggiapiedi può essere fissato prima o dopo che il bambino è seduto.

L'altezza è regolabile utilizzando le diverse fessure. Per questo, posizionarsi di fronte alla sedia e tirare la piastra verso di sé. Spostare verso l'alto o il basso e spingere la piastra nella fessura corrispondente all'altezza scelta.

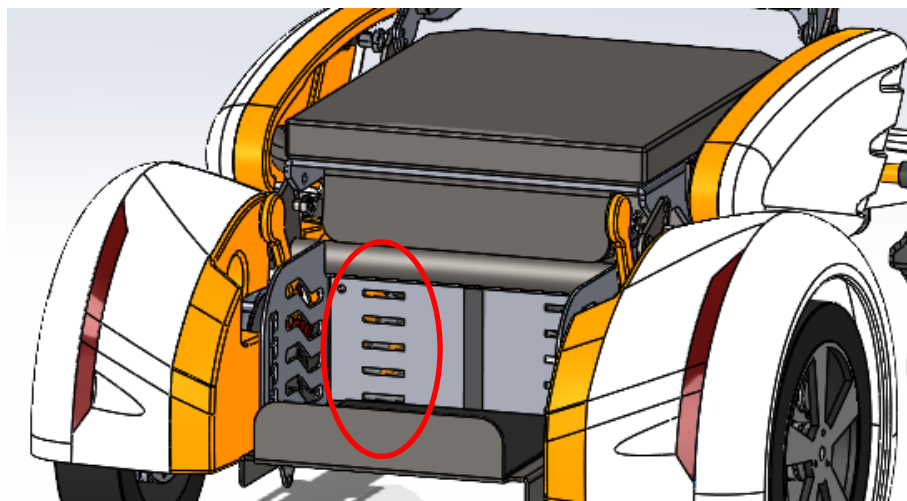

Ruote

Il Freeli è dotato di ruote solide anti-foratura, che non richiedono alcun gonfiaggio.

Freeli è dotato di ruote motrici anteriori.

Ogni ruota è dotata di un meccanismo di bloccaggio che funge da freno. Il meccanismo dei motori offre due posizioni: "guida " e " ruota libera ". Le ruote sono in " modalità di guida " quando la leva è inserita. Quando le 2 leve sono attivate il Freeli può essere guidato dall'utente o l'accompagnatore.

Non tentare di tirare o spingere il Freeli in modalità guida.

In caso di necessità, la sedia può essere spinta manualmente.

Per fare questo, è necessario sbloccare i freni utilizzando le leve di sblocco meccanico che si trovano tra il piede e la ruota.

Quando le leve sono disinnestate la sedia a rotelle diventa "ruota libera". In questa modalità, il Freeli può essere spostato manualmente per il trasporto, per attraversare una strada o in caso di batteria scarica.

Prima di spostare il Freeli, è importante assicurarsi che entrambe le leve siano disinserite.

Si prega di notare che una volta che la funzione frenante è stata disattivata, la sedia a rotelle non ha più frenatura attiva e passa in modalità " coasting ", quindi assicurarsi che i freni siano bloccati ogni volta che la sedia a rotelle è immobilizzata.

In modalità coasting, è quindi fondamentale prestare attenzione quando il bambino è seduto nel Freeli e le leve sono disinnestati.

Non andare mai in giro su un piano inclinato!

Batteria

Prima di ogni utilizzo, verificare che la batteria sia sufficientemente carica per l'uso previsto.

Solo il personale autorizzato dal produttore è autorizzato a modificare o sostituire le batterie.

Si consiglia di utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito dal produttore. Verificare che la tensione elettrica indicata sulla targhetta corrisponda a quella del paese in cui il prodotto viene utilizzato. Evitare il surriscaldamento e pulire il caricabatterie solo con un panno asciutto.

- Non utilizzare mai una batteria danneggiata.
- Non utilizzare mai il caricabatterie se si ritiene che sia danneggiato.
- Assicurarsi che l'interruttore principale sia spento prima di collegare o scollegare il caricabatterie.
- Freeli non può essere guidato durante la ricarica.

Per esempio, è possibile rimuovere la batteria per il trasporto. Per fare ciò, scollegare la cinghia di tenuta e quindi scollegare il connettore. Far scorrere la batteria verso di sé con l'impugnatura, facendo attenzione a non farla cadere sul pavimento.

Per reinserire la batteria, infilarla delicatamente nel supporto, fissare con la cinghia e ricollegare il connettore.

Per caricare la sedia a rotelle, inserire il connettore nella presa di ricarica sulla parte anteriore del joystick. Inserire il caricabatterie nella presa di corrente e accenderlo.

Durante il caricamento, Freeli non risponde al controllo del joystick e non può essere guidato. Quando Freeli è in carica, le spie dell'indicatore della batteria sul joystick scorrono e lampeggiano.

Quando la ricarica è terminata, spegnere prima il pulsante di accensione e quindi il joystick. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente, quindi scollegare il connettore sulla parte anteriore del joystick.

Nota che c'è una presa USB sulla parte anteriore del joystick che può essere utilizzata per caricare un telefono cellulare ad esempio.


Se il Freeli viene utilizzato quotidianamente, è consigliabile caricarlo ogni giorno. Se non si utilizza la batteria per diversi giorni, assicurarsi che questa sia carica per almeno 12 ore.

La batteria deve essere conservata a lungo al riparo da calore e umidità.

Se noti qualcosa di anomalo (ad esempio, la batteria fuma o è danneggiata), interrompi immediatamente l'uso.

Joystick

Il joystick consente un controllo proporzionale, ovvero la velocità è proporzionale alla forza esercitata su di esso entro i limiti di velocità definiti. È importante assicurarsi che i cavi siano inseriti e mantenuti correttamente. Il joystick può essere installato sul bracciolo destro o sinistro utilizzando la vite sotto il bracciolo.

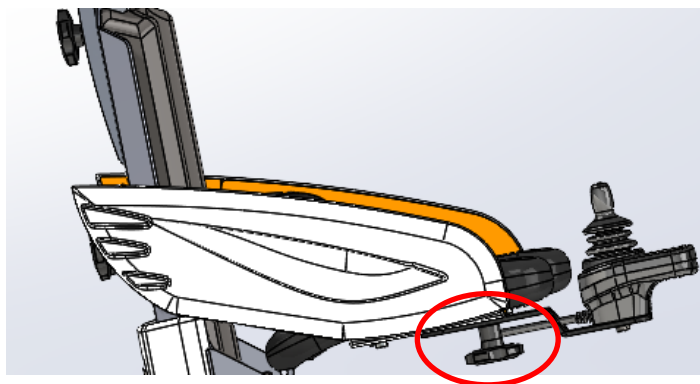

Accendi il Freeli usando l'interruttore sul joystick.

La velocità è regolabile con i 2 pulsanti in basso. Le luci al centro del joystick indicano la velocità. Più luci sono accese, più veloce sarà la sedia e viceversa. Rallenta premendo il tasto in basso a sinistra. Aumenta la velocità premendo il pulsante in basso a destra.

Interferenze elettromagnetiche

Il Freeli è conforme agli standard internazionali per le interferenze elettromagnetiche. Tuttavia, in alcune situazioni, il controllo del prodotto potrebbe essere disturbato da campi elettromagnetici provenienti da altri dispositivi, come radio, televisori, apparecchiature mediche che emettono radiazioni e telefoni cellulari. Queste interferenze possono influenzare il controllo e modificare le proprietà di guida in modo imprevedibile. In questo caso, si consiglia di allontanare la sedia a rotelle elettrica dalla fonte di disturbo o di spegnerla. Se ciò non è possibile, spegnere il comando della sedia a rotelle e informare il personale specializzato

Trasporto

Assicurarsi che il Freeli sia ben posizionato e che le ruote non siano in modalità " ruota libera ". Spegnerne il joystick durante il trasporto. Se necessario, ribaltare lo schienale.

Se il veicolo è dotato di sistema di fissaggio, utilizzare questo per bloccare il Freeli nel veicolo. Fare riferimento alle istruzioni del produttore del sistema.

ELI Innovation non è responsabile dei sistemi di fissaggio utilizzati e del loro utilizzo. Assicurati di utilizzare solo sistemi di fissaggio che soddisfino i requisiti legali e siano progettati per il peso totale del prodotto.

Per il trasporto aereo, contatta la compagnia aerea.

Caratteristiche generali

Larghezza totale del veicolo	580mm
Lunghezza complessiva del veicolo	650mm
Peso totale del veicolo	40kg
Velocità massima	6 km / h
Attraversamento	40mm
Rimozione di ostacoli	40mm
Larghezza del sedile	235mm - 285mm
Profondità di seduta	155mm - 245mm
Altezza del sedile	350mm / 450mm
Inclinazione dello schienale	Regolabile da 90 a 97°
Altezza dello schienale	430mm
Gambe all'angolo della superficie del sedile	90°
Peso massimo dell'utente	35kg
Livello di potenza sonora rilevato	Interno <65dB Esterno <75dB
Tensione nominale della batteria	24V

Manutenzione

È importante effettuare regolarmente un controllo visivo del vostro Freeli per identificare eventuali danni o usura che necessitano di riparazione. Puoi mantenerlo pulito usando un panno umido e un detergente delicato, ma evita grandi quantità di acqua.

Se non si utilizza regolarmente il Freeli, è importante ricaricare periodicamente la batteria per mantenere le prestazioni a lungo termine. Per massimizzare la durata della batteria, ricaricarla per almeno 12 ore ogni 3 mesi.

Le imbracature e i cinturini possono essere lavati in lavatrice. I rivestimenti possono essere puliti con un panno umido.

La carenatura di plastica può essere sostituita se necessario.

Assicurati di controllare regolarmente lo stato di usura della sedia a rotelle e contattaci per sostituire le parti necessarie.

Non esitate a contattare il vostro rivenditore se necessario.

Garanzia

Contatta il tuo rivenditore per informazioni sulle condizioni di garanzia

La modifica del Freeli senza il permesso del produttore invaliderà la garanzia.

Grazie per la vostra fiducia

35 rue du petit bois
Bâtiment D
69440 Mornant
FRANCIA

www.ergoconcept.net/it