

GONFLEUR ÉLECTRIQUE PORTATIF



Ultra pratique, le gonfleur électrique multifonction permet de gonfler les roues pneumatiques des fauteuils ErgoConcept. Facile, il suffit de régler la pression souhaitée et c'est reparti !

Le «+»: LAMPE LED INTÉGRÉE

Spécifications techniques

Référence	ACE003
Pression préconisée	2,5 BAR
Courant	USB 5V2A
Voltage	DC 12,8V
Batterie	500 mAh*4
Poids	279 g
Dimensions	Diam 32mm / H230mm


Voir tous les produits ErgoConcept sur www.ergoconcept.net



1/3




Contenu du kit

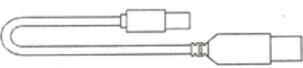
Pompe	
Manomètre	
Câble de chargement micro-USB	
Buse à air Presta	
Aiguille	
Buse à air	

Fonctions

1. Gonflage
2. Détection de pression
3. Éclairage LED

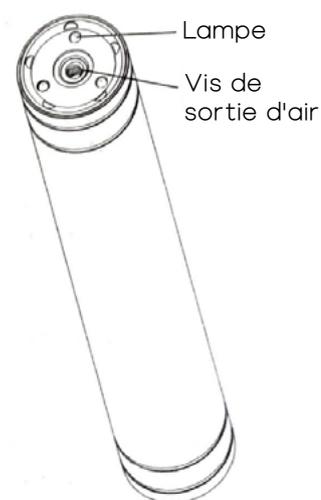

Panneau de contrôle

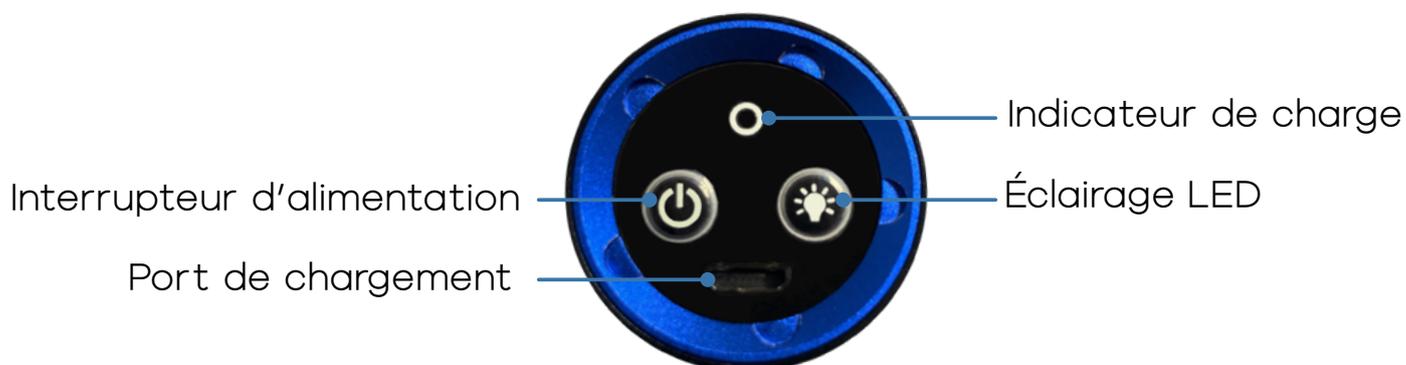

Voir tous les produits ErgoConcept sur www.ergoconcept.net

CE 2/3

Utilisation Gonflage

Etape 1

Vissez l'extrémité du manomètre dans la vis ouverture, puis vissez l'extrémité du tuyau d'air dans la valve du pneu.



Etape 2

Appuyez sur l'interrupteur du manomètre pour activer son Écran LCD, appuyez à nouveau sur cet interrupteur pour choisir les unités de pression.



Etape 3

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour démarrer le gonflage.



Etape 4

Lorsque la valeur de la pression affichée sur l'écran LCD atteint la pression recommandée valeur de l'objet gonflé, appuyez sur la touche d'alimentation pour arrêter le gonflage.

Important :

- Ne vous éloignez pas pendant le gonflage. En cas de bruit anormal ou de température excessive, appuyez sur l'interrupteur pour arrêter immédiatement la pompe
- Une fois le gonflage terminé, retirez rapidement le tuyau d'air du pneu pour éviter toute fuite d'air.
- Rangez la pompe et ses accessoires dans un endroit frais et sec.

Détection de pression

Connectez le manomètre à la valve du pneu, puis appuyez sur l'interrupteur. La pression actuelle du pneu s'affiche à l'écran.

Fonction d'éclairage LED

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer/éteindre l'éclairage LED.

Recharge de la pompe

Rechargez la pompe à l'aide du câble micro-USB fourni. Le voyant lumineux est rouge lorsque la pompe est en charge. Une fois la charge terminée, il passe automatiquement au vert. Remarque : Si la pompe ne fonctionne pas, chargez-la complètement dans les 7 jours. Une fois la charge terminée, rechargez-la complètement dans les 4 à 6 mois suivant son stockage. Cela permet de prolonger sa durée de vie.

Consignes de sécurité

- Il est interdit aux enfants d'utiliser cette pompe ! Conservez-la dans un endroit sûr, hors de portée des enfants ! N'insérez jamais la buse d'air dans la bouche, les oreilles ou les yeux d'une personne ou d'un animal. N'utilisez pas la pompe comme un jouet.
- Il est interdit d'utiliser cette pompe dans des zones inflammables ou explosives (comme les stations-service).
- Ne vous éloignez pas pendant le gonflage. Laissez la pompe reposer 10 minutes après 10 minutes d'utilisation continue.

Voir tous les produits ErgoConcept sur www.ergoconcept.net



3/3

