

# INSTALLATION PORTE-CANNE

**GAMME BR**

RÉFÉRENCE ACPRBR01D



COMPATIBLE AVEC

**BR7L**  
CARBONE

**BR7L**

**BR8L**

**BR8L**  
EXPLORER

Voir tous les produits ErgoConcept sur [www.ergoconcept.net](http://www.ergoconcept.net)



Il est possible de modifier l'inclinaison du porte canne en dévissant la petite vis à l'arrière



1. Passez une des deux sangles dans une des fentes de l'attache



2. Puis passez la deuxième sangle dans l'autre fente de l'attache



3. Passez les crochets dans l'emplacement situé à l'extrémité des sangles



4. Retournez l'attache, détachez la protection de l'autocollant et collez la languette sur l'attache.



5. Installez ensuite l'attache sur le haut du dossier et positionnez le support sur l'attache grâce au magnétisme.



6. Positionnez la canne et fermez le support en vissant le cache.

Pour retirer la canne appuyez sur le petit levier gris pour détacher le support avec la canne



Voir tous les produits ErgoConcept sur [www.ergoconcept.net](http://www.ergoconcept.net)