

ERGO
OBL 3.0

FRE-Classe B



GUIDE D'UTILISATION

PRÉCAUTIONS

Avant toute chose, l'équipe d'ErgoConcept tient à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en achetant le modèle **ERGO 08L 3.0**. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour que votre nouveau fauteuil vous apporte une totale satisfaction. Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à nous contacter à l'adresse suivante : contact@ergoconcept.net pour nous faire part de toutes remarques positives ou négatives.

Merci de prendre connaissance de l'intégralité du présent guide AVANT TOUTE UTILISATION. ErgoConcept décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériel dans le cas où le fauteuil n'a pas été utilisé dans le respect le plus strict du présent guide.

Dans ce guide, les avertissements sont indiqués par des pictogrammes, merci de vous référer aux indications ci-dessous pour appréhender au mieux les points d'attention particulière.



AVERTISSEMENT!

Ce pictogramme signale une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir des conséquences corporelles graves pouvant entraîner des blessures ou la mort si elle ne peut pas être évitée.



INTERDICTION!

Ce pictogramme indique une interdiction pouvant impliquer une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir des conséquences corporelles pouvant entraîner des blessures si cette interdiction n'est pas respectée.



ATTENTION!

Ce pictogramme signale une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir des conséquences corporelles pouvant entraîner des blessures légères ou bénignes si elle ne peut pas être évitée.



ACCOMPAGNEMENT

Ce pictogramme signale une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir des conséquences corporelles si l'utilisateur n'est pas accompagné.



POINT DE VIGILANCE

Ce pictogramme signale une vigilance particulière lors de la manipulation du produit. Dans le cas contraire, il peut en résulter des conséquences matérielles pour le fauteuil et une durée de vie du produit écourtée.

Visuels non contractuels

Visuels non contractuels

SOMMAIRE

I / INFORMATIONS PRODUIT	4
II / MISE EN SERVICE DU FAUTEUIL	5
III/ MÉTHODE D'OUVERTURE ET DE PLIAGE DU FAUTEUIL	6
A. Méthode d'ouverture du fauteuil	6
B. Méthode de pliage du fauteuil	7
IV/ RÉGLAGE DES COMPOSANTS.....	8
A. Installations et réglages des Reposes pieds.....	8
B. Dossier	9
C. Eclairage	10
D. Le joystick	11
E. Largeur d'assise.....	11
F. Les accoudoirs.....	12
G. Les batteries.....	13
V/ MÉTHODE DE PILOTAGE ET MANIPULATION.....	14
VI/ CONSEILS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ.....	17
VII/ MAINTENANCE ET TESTS.....	22
VIII/ DYSFONCTIONNEMENT ÉVENTUELS	23
IV/ PARAMÈTRES TECHNIQUES.....	26
X/ GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE	27

Date d'achat :

Nom de l'utilisateur :

Numéro de série :

Vous le trouverez à côté du contrôleur à l'arrière du fauteuil

I / INFORMATIONS PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

Poids	25 kg (+batteries 1,8kg x2)
Autonomie	25 km
Vitesse Max	6 km/h
Charge utilisateur	125 kg
Compatible Avion	oui  avec 1 batterie
Dimensions ouvert (LxlxH)	100-112x60,5x81-93 cm
Dimensions plié	44x60,5x78 cm
Espace el accoudoirs	47 à 51 cm
Largeurs d'assise disponibles	36 - 38,5 - 40 - 41 cm
Taille des roues	avant : 8 pouces / arrière : 10 pouces
Franchissement	6 cm
Pente de sécurité	6°
Rayon de braquage	90 cm
Hauteur Sol-Siège	54 cm
Rayon de braquage	90 cm
Puissance moteur	2x200W
Puissance batterie	2 x 10,5 Ah
Voltage batterie	24V
Pression pneumatique	préconisation : 2,5bar

Visuels non contractuels

II / MISE EN SERVICE DU FAUTEUIL



- Déballiez le fauteuil des différents cartons et plastiques de protection
- Veillez à ce qu'aucune pièce ne reste au fond du plastique de protection avant de le jeter
- À l'aide d'un cutter ou d'une pince coupante, sectionnez les 2 Serflex qui bloquent le dépliage du fauteuil
- En vous référant à la partie dépliage du fauteuil, dépliez le
- Vous trouverez dans la sacoche sous le siège les éléments suivants : Ceinture de sécurité / Trousse à outils / Joystick / Chargeur de batterie / Guide d'utilisation
- Installez le joystick à l'extrémité de l'accoudoir souhaité, réglez-le à la longueur souhaitée et vissez-le à l'aide de la molette située sous l'accoudoir droit. Pour brancher le joystick à la prise supérieure de la batterie, nous vous conseillons de la faire passer à travers les sangles de tensions du dossier.
- Vérifiez que les branchements à l'arrière du fauteuil soient corrects
- Positionnez le coussin d'assise sur le siège
- Dégagez les roues arrière des plastiques de protection
- Insérez les repose-pieds dans les tubes horizontaux
- Installez la ceinture de sécurité
- **Lorsque le fauteuil est complètement ouvert et branché, veuillez suivre les instructions suivantes pour une première expérience réussie avec votre fauteuil.**
- **Nous conseillons également de vérifier la pression des pneumatiques avant car cela a un impact important sur la maniabilité du fauteuil.**
- Chargez la batterie au maximum dès la première utilisation



Il est impératif de n'utiliser que le chargeur de batterie Lithium fourni par ErgoConcept. L'utilisation de tout autre chargeur est formellement interdite.

III/ MÉTHODE D'OUVERTURE ET DE PLIAGE DU FAUTEUIL

A. Méthode d'ouverture du fauteuil



Le fauteuil est «debout» en position fermée



Placez l'une sur le haut du dossier, l'autre sur l'extrémité de l'assise



En écartant l'assise du dossier, le fauteuil s'ouvre. Veillez à bien entendre le bruit du verrouillage



Le fauteuil est ouvert.

B. Méthode de pliage du fauteuil



Le fauteuil est déplié.



Placez une main sur le haut du dossier, l'autre main enclenche la barre de pliage située à l'arrière du fauteuil, tout en poussant le dossier vers l'avant



Le fauteuil est déverrouillé, il convient de plier le fauteuil en rapprochant le dossier de l'assise



Le fauteuil est fermé.

Visuels non contractuels

Visuels non contractuels

IV/ RÉGLAGE DES COMPOSANTS

A. Installations et réglages des Reposes pieds

Les repose-pieds de l'ERGO 08L 3.0 sont escamotables et réglables en longueur

Pour fixer les repose pieds, il convient d'insérer les tiges ovoïdes des repose pieds dans les tubes creux du châssis de votre fauteuil. (Figure 1)

Dans la limite des deux flèches indiquées sur les tubes des repose-pieds, choisissez la longueur souhaitée pour chaque repose pieds. (Figure 2)

Lorsque la longueur est satisfaisante, bloquez les tubes à l'aide de la goupille de verrouillage... (Figure 3)



Figure 1



Figure 2



Figure 3

Goupille de verrouillage du repose-pieds



arrête-talons



Les repose-pieds de l'ERGO 08L 3.0 sont équipés de roulettes de franchissement qui permettent un franchissement supérieur à 5 cm


B. Dossier

Le dossier de l'ERGO 08L 3.0 est réglable :


- en inclinaison
- en hauteur
- en tension

Réglage en inclinaison

Le dossier de l'ERGO 08L 3.0 dispose d'un réglage en inclinaison par un système de vérin. Pour modifier l'angle du dossier, il convient de tirer sur la manette située à droite de l'assise. En la tirant, le dossier est libéré et vous pouvez régler l'inclinaison dans la position souhaitée.

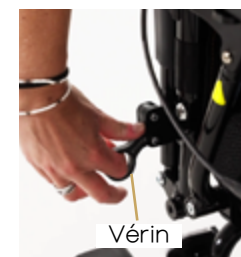

Vérin

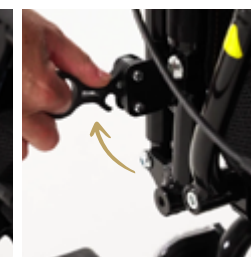

Réglage en tension

Le dossier de l'ERGO 08L 3.0 est réglable en tension. Pour cela il faut ouvrir la sangle sracth qui se trouve derriere le tissu du dossier et serrer cette sangle jusqu'à la tension souhaitée.



Réglage en hauteur

Le dossier de l'ERGO 08L 3.0 est réglable en hauteur. Pour modifier la hauteur, il convient de libérer les 2 **mollettes** situées à l'arrière du dossier, et de positionner le dossier à la hauteur souhaitée.

Si vous optez pour une position haute, il convient d'ajouter la sangle fournie dans le cadre.


A l'inverse, si vous choisissez une position basse, il est conseillé d'enlever cette sangle.



C. Eclairage

Eclairage avant

L'ERGO 08L 3.0 est équipé d'éclairage à l'avant situé sous le joystick à côté du port de chargement

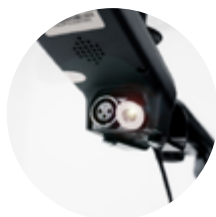

Lampe LED avant intégrée



Eclairage arrière

L'ERGO 08L 3.0 est équipé d'éclairage arrière.

3 fonctions possibles :

- Feu de position
- Clignotants
- Feu de détresse

Visuels non contractuels

Visuels non contractuels

D. Le joystick

Réglage en longueur

Fixez le joystick et son support dans le tube droit ou gauche situé sous la manchette. Desserrez le bouton de fixation, coulissez le support dans le tube puis ajustez la position du joystick ou retirez-le.



Réglage en hauteur


Le joystick de l'ERGO 08L 3.0 est réglable jusqu'à 3 cm de hauteur

A l'aide de la clé Allen, dévissez les 2 vis du support joystick, puis réglez à la hauteur souhaitée. Fixez fermement le support en revissant les deux vis.



E. Largeur d'assise

Il est possible de régler la largeur d'assise de 36 cm à 41 cm en installant la plaque sous le siège.

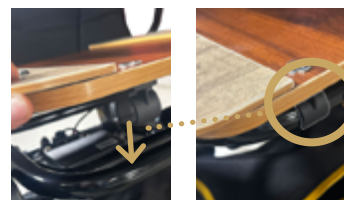

Installation : Positionnez la plaque de réglage de la taille d'assise sur le cadre du siège, puis clipsez-la en appuyant sur la plaque pour que chaque encoche noire soit fixer sur le tube du châssis.



Réglage : Pour régler la largeur, dévissez les 4 vis à l'aide d'une clé allen puis ajouter la largeur en glissant les vis dans leurs encoches et revissez-les fermement.

Le choix de la taille du coussin adapté à la dimension de l'assise est disponible à la commande auprès de votre revendeur.

F. Les accoudoirs

Réglage en largeur

Il est possible sur L'ERGO 08L 3.0 d'élargir l'espace entre les 2 accoudoirs afin d'augmenter la taille de l'assise. Pour cela, il convient d'ajouter des entretoises livrées avec le fauteuil.

Il y a 4 entretoises qui peuvent être mises pour élargir le fauteuil ou enlever pour réduire la largeur.



Vous trouverez dans la sacoche de l'accoudoir, le kit de visserie nécessaire à l'installation des entretoises.



Avec entretoises



Sans entretoises

Escamotage des accoudoirs

Sous chacun des accoudoirs, il y a une petite gâchette qui permet l'ouverture et la fermeture du fauteuil.

Cette gâchette doit **impérativement** être bloquée lors de l'utilisation du fauteuil.



Libérer la gâchette va permettre d'escamoter les accoudoirs.



Gâchette pour escamoter les accoudoirs

G. Les batteries

Instructions de chargement de la batterie

- Il est impératif de n'utiliser que le chargeur de batteries Lithium original fourni par ErgoConcept. **L'utilisation de tout autre chargeur est formellement interdite.**
- Brancher le chargeur dans la prise située sur le joystick, veiller à ce que la connexion se fasse convenablement
- L'autre partie du chargeur doit être branchée dans une prise électrique
- La diode lumineuse rouge indique que les batteries sont en charge
- La diode lumineuse verte indique que les batteries sont complètement rechargées
- Veiller à ne pas utiliser le fauteuil durant le rechargement de la batterie lorsqu'elle est placée dans le fourreau.
- S'assurer que le chargeur et la batterie ne chauffent pas pendant le chargement de la batterie, dans le cas contraire, cela peut provoquer des dommages ou un risque d'inflammation.
- Le temps de chargement moyen est compris entre 2 et 8 heures, veillez à ne pas laisser le chargeur branché pendant une durée prolongée, il est fortement conseillé de la débrancher lorsque la batterie est pleinement rechargée.
- Le chargeur de la batterie doit être préservé de tout contact avec de l'eau ou de la moisissure, ou de chocs violents.

Méthode de chargement de la batterie

- Insérez la fiche dans la prise du joystick, en veillant à l'aligner correctement
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur standard. Le voyant de charge s'allumera.

État du voyant du chargeur :

Voyant rouge ou éteint : Batterie déconnectée

Voyant orange : Charge en cours


Voyant vert : Batterie complètement chargée



Port de charge

Le retrait de la batterie

Appuyez sur le bouton situé sur la poignée de la batterie en levant la batterie pour la sortir du fourreau.

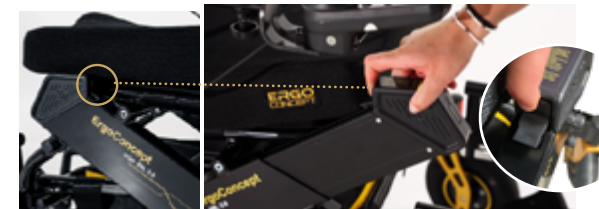


Il est impératif de n'utiliser que le chargeur de batterie Lithium fourni par ErgoConcept. L'utilisation de tout autre chargeur est formellement interdite.

Visuels non contractuels

Visuels non contractuels

V/ MÉTHODE DE PILOTAGE ET MANIPULATION

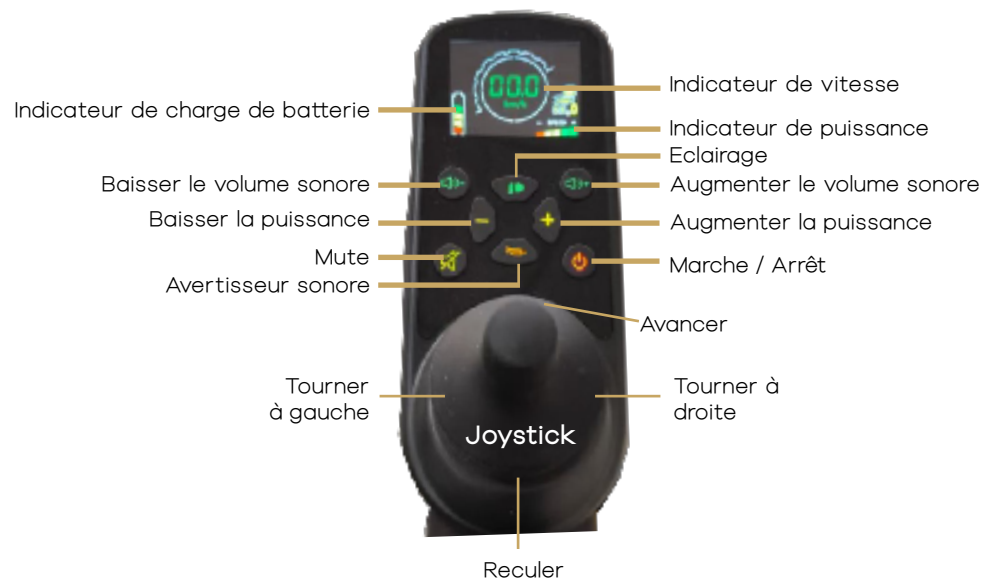

Joystick : contrôler la direction et la vitesse de déplacement du fauteuil

Jauge de puissance de la Batterie : si toutes les diodes rouges, jaunes, vertes sont allumées, la batterie est complètement chargée. Si seule la lumière rouge est allumée, la batterie est presque vide.

Indicateur de vitesse : les boutons « + » et « - » permettent de régler la vitesse du fauteuil

INSTRUCTIONS DE CONDUITE

Avancer : Appuyez légèrement sur le joystick en avant

S'arrêter : Relâchez le joystick

Reculer : Appuyez légèrement sur le joystick en arrière. (l'utilisateur doit faire preuve d'une attention particulière pour anticiper les déplacements vers l'arrière et éviter les collisions)

Tourner : Appuyez légèrement sur le joystick vers la droite ou la gauche. (l'utilisateur doit faire preuve d'une attention particulière pour anticiper les déplacements latéraux et éviter les collisions)

Piloter dans une courbe : Appuyez légèrement sur le joystick en direction de la courbe avec une vitesse adaptée

Éviter et contourner les obstacles : Appuyez légèrement sur le joystick afin d'éviter et de contourner les obstacles. Adaptez votre vitesse à la situation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Plus l'amplitude de la poussée sera grande, plus la vitesse du fauteuil sera importante
- Relâcher le joystick pour stopper le fauteuil
- Appuyer sur le bouton 0 rouge pour éteindre le fauteuil.
- Si vous avez besoin de pousser le fauteuil, veillez à libérer le frein moteur en basculant les petits leviers rouges situés sur chacune des roues arrière



POINT DE VIGILANCE

Franchissement d'une petite marche :

Dirigez lentement le fauteuil face à la marche et maintenez le joystick en avant pendant le franchissement. La marche ne doit pas excéder 6 cm de hauteur.

Piloter en montée :

Le corps doit légèrement être penché en avant afin de garder le centre de gravité en avant et piloter avec une vitesse adaptée. L'inclinaison de la pente ne doit pas excéder 6°.

Entrer et sortir d'un ascenseur :

L'utilisateur doit apporter une attention particulière à l'intervalle de temps d'ouverture et de fermeture des portes de l'ascenseur afin d'éviter toutes collisions lorsqu'il rentre ou sort de l'ascenseur.

Circulation sur les trottoirs :

En ville, il est obligatoire de circuler sur les trottoirs, il est interdit de circuler sur les rues ou les routes. Pour traverser, utilisez obligatoirement les passages piétons.

Passages piétons :

Pour traverser les rues, utilisez obligatoirement les passages piétons. Accordez une attention particulière lors de la montée sur les bateaux des trottoirs.

Visuels non contractuels

Visuels non contractuels

Basculement du mode manuel au mode électrique



Pour fonctionner, les moteurs doivent être embrayés et les leviers rouges à l'arrière des servomoteurs, relevés. Le fauteuil fonctionnera alors électriquement mais ne pourra pas être poussé par une tierce personne.

Pour pousser le fauteuil manuellement, il faut débrayer les moteurs en rabaisant les leviers rouges. Lorsque les moteurs sont débrayés, le fonctionnement électrique est désactivé.



Transport et stockage

Maintenir le fauteuil plié dans une position verticale en appui sur les roues arrière et les roulettes noires de sécurité, le joystick, vers le haut. D'une main, saisissez la barre de préhension située sous l'assise du siège. Le fauteuil ainsi plié peut tenir dans le coffre d'une petite voiture.

La batterie doit être complètement chargée et le fauteuil gardé dans un endroit sec et aéré en cas de rangement de longue durée. Les batteries doivent être chargées au moins une fois tous les 3 mois pour ne pas entraîner de perte de performance.

- Il est interdit de stocker le fauteuil dans un environnement trop chaud ou trop froid au risque de raccourcir la durée de vie du fauteuil. Éviter de conserver la batterie dans un endroit trop chaud, au risque d'inflammation.
- Il y a des composants électroniques dans le joystick, éviter de presser sur les boutons lorsque ce dernier est éteint.
- Attention de ne pas laisser le fauteuil sur les fourreaux latéraux de la batterie, au risque de causer des dommages sur cette dernière.

Visuels non contractuels

VI/ CONSEILS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

L'utilisateur doit faire preuve d'une capacité de discernement et de jugement nécessaire à l'utilisation du fauteuil en toute sécurité, ainsi qu'une aptitude à contrôler et maîtriser le fauteuil.

L'utilisateur doit prendre connaissance de ce guide d'instructions AVANT toute utilisation et le conserver en cas de besoin.

Il y a des composants électroniques dans le joystick, éviter de presser sur les boutons lorsque ce dernier est éteint.

Attention de ne pas laisser le fauteuil sur les fourreaux latéraux de la batterie au risque de causer des dommages sur cette dernière.



POINT DE VIGILANCE

Il est interdit de stocker le fauteuil dans un environnement trop chaud ou trop froid au risque de raccourcir la durée de vie du fauteuil. Éviter de conserver la batterie dans un endroit trop chaud, au risque d'inflammation.

Il y a des composants électroniques dans le joystick, éviter de presser sur les boutons lorsque ce dernier est éteint. Attention de ne pas laisser le fauteuil sur les fourreaux latéraux de la batterie au risque de causer des dommages sur cette dernière.



Il est impératif de n'utiliser que le chargeur de batterie Lithium fourni par ErgoConcept. L'utilisation de tout autre chargeur est formellement interdite.

Visuels non contractuels



ATTENTION

Lors de l'installation sur l'assise, ne jamais prendre appui directement sur le joystick mais utiliser l'accoudoir.

Veiller à ne pas dégrader le câble électrique de la batterie lorsque vous le débranchez.

Veiller à ce que le câble reliant le joystick à la batterie soit inséré dans les petites attaches situées le long des accoudoirs afin d'éviter tout risque de dégradation.

L'utilisation du fauteuil est interdite en état d'ébriété.

L'utilisateur doit comprendre et connaître les spécificités et fonctionnalités du fauteuil et pratiquer un entraînement répété sur un sol plat et sécurisé avant une utilisation quotidienne.

Durant la période de prise en main des fonctionnalités du fauteuil, l'utilisateur doit être accompagné par une personne compétente.

Lors du pliage et dépliage, ne jamais introduire vos mains ou doigts dans le système de pliage du fauteuil.



ATTENTION



INTERDICTION



ACCOMPAGNEMENT

1 - Traversée de chemin de fer :

Il est absolument interdit de traverser des chemins de fer sans être accompagné par une personne compétente. Le franchissement d'une marche trop élevée peut engendrer des accidents de basculement et provoquer des accidents corporels graves.

2 - Circulation en pente :

Circuler sur une surface en pente supérieure à 6° (montée ou descente) peut engendrer des accidents de basculement et provoquer des accidents corporels graves. Si la situation le nécessite, la présence d'un accompagnant compétent est obligatoire lors de la circulation sur des surfaces pentues.

3 - Franchissement de marches :

Le franchissement d'une marche trop élevée peut engendrer des accidents de basculement et provoquer des dégâts corporels graves. Si la situation le nécessite, la présence d'un accompagnant compétent est obligatoire lors du franchissement de marches.

4- Feux de circulation :

L'utilisateur du fauteuil doit accorder une attention particulière au délai de changement de couleur des feux de circulation. Le non-respect de ce point peut provoquer des accidents corporels graves. Si la situation le nécessite, la présence d'un accompagnant compétent est obligatoire pour la traversée des passages piétons.

5 - Dangers liés à l'utilisation de batteries non rechargées :

Une panne de batterie due à un défaut de rechargement peut se produire lorsque l'utilisateur traverse la rue et provoquer des accidents graves. Si la situation le nécessite, la présence d'un accompagnant compétent est obligatoire pour la traversée des passages piétons.

6 - Montée et descente de lit :

Des manœuvres inappropriées lorsque l'utilisateur accède ou sort de son lit peut provoquer des dégâts corporels graves. Si la situation le nécessite, la présence d'un accompagnant compétent est obligatoire pour la montée et la descente du lit si la situation le nécessite.

Visuels non contractuels

Visuels non contractuels

7 - Réparation :

Il est interdit à l'utilisateur (ou toute personne non-autorisée) de réparer son fauteuil lui-même, cela peut causer des dommages définitifs sur le fauteuil et provoquer des dégâts corporels graves. Cela provoque également l'annulation de toutes formes de garantie constructeur. Le fauteuil doit obligatoirement être réparé par un réparateur professionnel agréé, ou le service de maintenance d'ErgoConcept.

8 - Sécurité Enfants :

Il est absolument interdit de laisser un enfant jouer avec le produit, cela peut causer des dommages définitifs sur le fauteuil et provoquer des dégâts corporels graves. Cela provoque également l'annulation de toutes formes de garantie constructeur. Le fauteuil doit obligatoirement être rangé dans un endroit inaccessible pour un enfant / Il est indispensable de noter que le fauteuil, ne doit pas être utilisé comme siège-auto.

9 - Manutention :

Il est absolument interdit de saisir les batteries ou leur fourreau pour soulever ou déplacer le fauteuil. Cela peut causer des dommages définitifs sur le fauteuil et provoquer des dégâts corporels graves. Les personnes qui soulèvent ou déplacent le fauteuil doivent le saisir par le cadre.

10 - Nettoyage :

Projeter de l'eau directement sur le fauteuil électrique peut causer des dommages définitifs sur le fauteuil et provoquer des accidents corporels graves. Essuyer le fauteuil avec un tissu propre et humide si nécessaire.



INTERDICTION

- Les batteries doivent être préservées de tout contact avec de l'eau, de l'humidité ou de la moisissure, cela peut causer des dysfonctionnements, des courts-circuits.
- Si un court-circuit se produit, cela peut provoquer un arc électrique susceptible de provoquer des brûlures ou un incendie.
- Les batteries doivent être préservées de tout contact avec du feu ou une forte source de chaleur, dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Il est interdit de démonter les batteries ou de leur infliger de violents impacts, cela peut provoquer une inflammation des batteries ou un incendie.
- Il est interdit d'exposer les batteries à un environnement trop chaud ou extrêmement froid, cela peut diminuer la performance des batteries ou les endommager.
- Il est très fortement déconseillé de laisser les batteries sur la plage arrière d'un véhicule, cela peut enflammer les batteries ou provoquer un incendie.
- Si les batteries deviennent chaudes, se déforment ou dégagent une odeur inhabituelle pendant l'utilisation ou le rechargement, vous devez impérativement et immédiatement cesser le chargement ou l'utilisation, dans le cas contraire, cela peut endommager les batteries ou les enflammer.
- En cas de fuite des batteries, elles doivent impérativement être tenues éloignées de toute source incandescente ou de chaleur, dans le cas contraire cela peut provoquer une inflammation des batteries ou une explosion.
- Ne jamais laisser un enfant manipuler ou jouer avec les batteries, et conserver les dans un endroit inaccessible pour les enfants.
- Le chargeur « Easy Loading Kit » et les batteries ne doivent pas être couvertes par un tissu ou tout autre objet pendant le chargement. Ils doivent être disposés dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Même inutilisées, les batteries Lithium Ion ont la particularité de se décharger. Il ne faut donc pas les stocker pour de longues périodes peu chargées, cela provoquera une baisse des performances.
- En cas de non-utilisation de longue durée, les batteries doivent être pleinement rechargées.
- Elles doivent être rechargées au minimum une fois tous les trois mois, afin de préserver leur performance.
- Les batteries Lithium Ion sont recyclables. Lors du renouvellement des batteries, l'utilisateur remettra les batteries Ergoconcept usagées, afin de procéder au recyclage.



Il est impératif de n'utiliser que le chargeur de batterie Lithium fourni par ErgoConcept. L'utilisation de tout autre chargeur est formellement interdite.

Visuels non contractuels

Visuels non contractuels

VII/ MAINTENANCE ET TESTS

1 - L'utilisateur doit vérifier régulièrement les vis et écrous (tous les 6 mois). Si les assemblages semblent desserrés, veiller à les revisser solidement pour assurer une utilisation en toute sécurité.

2 - Vérifier la bonne fluidité de rotation des roues avant et arrière (désenclenchées). Si elles présentent une résistance trop importante, remplacer le roulement à bille.

3 - Vérifier que les pneus, accoudoirs et autres parties plastiques ne soient pas trop usés. Si c'est le cas alors changer-les.

4 - Vérifier que les branchements et connecteurs électriques ne soient pas oxydés, dans le cas contraire, il faut les remplacer.

5 - S'assurer que les assemblages mécano-vissés soient fonctionnels, s'ils semblent trop lâches ou présentent un problème d'enclenchement ou de dés-enclenchement, remplacer les urgemment.

6 - Le remplacement des différents éléments doit être effectué par un réparateur professionnel, agréé par ErgoConcept ou le service de maintenance ErgoConcept. Ne pas les remplacer par vous-même.

VIII/ DYSFONCTIONNEMENT ÉVENTUELS

Défaut	Causes possibles	Solutions
L'alimentation ne démarre pas	A. Alimentation non connectée à l'hôte du contrôleur. B. Échec de la communication joystick-host. C. Batterie faible. D. Dysfonctionnement du contrôleur.	A. Connexion d'alimentation : Reconnectez fermement le câble d'alimentation de l'hôte du contrôleur. B. Lien du joystick : Assurez-vous que la fiche du joystick est complètement insérée. C. Alimentation électrique : Chargez complètement la batterie. D. Défaillance matérielle : si non résolue, le contrôleur peut être défectueux – contactez le support.
Le fauteuil roulant présente des vibrations et un bruit anormal pendant le démarrage	A. Limite de vitesse inférieure au seuil B. Déséquilibre de la phase moteur	A. Ajustez la limite de vitesse maximale aux paramètres spécifiés B. Remplacez l'ensemble moteur défectueux – contactez votre revendeur.
L'autonomie fauteuil roulant a considérablement diminué	A. Environnement à basse température en dessous de 0°C B. Terrain irrégulier ou inclinaison C Dégradation de la capacité de la batterie	A. Le comportement de la batterie est normal B. Une augmentation de la consommation d'énergie est attendue C. Remplacement de la batterie requis – contactez votre revendeur.
Défaut de charge	A. Un voyant du chargeur n'est pas allumé B. Le voyant vert du chargeur reste constamment allumé C. Le voyant vert du chargeur reste constamment allumé	A. Remplacez le chargeur B. Branchez solidement ou remplacez la batterie C. Capacité dégradée - remplacement de la batterie requis
Le voyant d'alimentation affiche la pleine capacité avec alarme	A. Échec de communication	A. Assurez-vous que tous les câbles d'alimentation sont connectés de manière sécurisée sans desserrage ni corrosion. Si le câblage est intact, veuillez contacter votre revendeur.
Moteur ne fonctionne pas	A. Une connexion de câblage lâche B : Dommages à l'engrenage interne C : Défaillance de la bobine du moteur	A. Vérifiez toutes les connexions de câble B : Remplacez le moteur C : Remplacez le moteur

Visuels non contractuels

Visuels non contractuels

Affichage des défauts

Affichage	Description	Cause du défaut	Solutions possibles
	1 pause + 1 bip court, avec l'icône d'erreur allumée et le code numérique vert « 01 » affiché au centre de l'écran LCD	Niveau de batterie extrêmement faible.	1. Besoin de charger - Allumer l'appareil une fois la charge terminée. 2. Besoin de charger - Allumer l'appareil une fois la charge terminée. 3. Contactez votre revendeur.
	1 pause + 2 bips courts, avec l'icône de panne allumée et le code numérique vert « 02 » affiché au centre de l'écran LCD.	Dysfonctionnement du moteur gauche	1. Vérifiez la connexion du moteur gauche. 2. Échangez les connexions des moteurs gauche et droit. Mettez sous tension et observez le schéma d'alarme du contrôleur : 2 bips > Panne du contrôleur (retour pour inspection). 4 bips > Panne du moteur (remplacez le moteur : Contactez votre revendeur.)
	1 pause + 3 bips courts, avec l'icône de défaut allumée et le code numérique vert « 03 » affiché au centre de l'écran LCD.	Dysfonctionnement du frein du moteur gauche	1. Vérifiez la connexion du frein gauche et l'interrupteur d'alimentation. 2. Échangez les câbles des moteurs gauche et droit. Après la reconnexion, redémarrez l'appareil et observez l'alarme du contrôleur : 3 bips > Défaillance du contrôleur (retour pour réparation) ; 5 bips > Dysfonctionnement du frein gauche (remplacez l'unité de freinage : Contactez votre revendeur)
	1 pause + 4 bips courts, avec l'icône de défaut allumée et le code numérique vert « 04 » affiché au centre de l'écran LCD	Dysfonctionnement du moteur droit	1. Vérifiez la connexion du moteur droit. 2. Intervertissez les connexions des moteurs droit et gauche. Mettez le contrôleur sous tension et observez le comportement de l'alarme : 4 bips > Défaillance du contrôleur (retour pour inspection). 2 bips > Défaillance du moteur (remplacez le moteur : Contactez votre revendeur).
	1 pause + 5 bips courts, avec l'icône de panne allumée et le code numérique vert « 05 » affiché au centre de l'écran LCD.	Dysfonctionnement du frein moteur droit.	1. Vérifiez la connexion du frein droit et l'interrupteur d'alimentation. 2. Échangez les câbles des moteurs gauche et droit. Après reconnexion, redémarrez l'appareil et observez l'alarme du contrôleur : 5 bips > Défaillance du contrôleur (retour en service) ; 3 bips > Dysfonctionnement du frein gauche (remplacez l'unité de freinage : Contactez votre revendeur).

	1 pause + 6 bips courts, avec l'icône d'erreur allumée et le code numérique vert « 06 » affiché au centre de l'écran LCD.	Dysfonctionnement interne du contrôleur.	Contactez votre revendeur.
	1 pause + 7 bips courts, avec l'icône de défaut allumée et le code numérique vert « 07 » affiché au centre sur l'écran LCD	Dysfonctionnement du joystick	Contactez votre revendeur
	1 pause + 8 bips courts, avec l'icône d'erreur allumée et le code numérique vert « 08 » affiché au centre de l'écran LCD.	Dysfonctionnement interne du contrôleur.	Contactez votre revendeur
	1 pause + 9 bips courts, avec l'icône de panne allumée et le code numérique vert « 09 » affiché au centre de l'écran LCD.	Défaut du capteur moteur gauche	1. Vérifiez le câblage du moteur gauche. 2. Intervertissez les câbles des moteurs gauche et droit, redémarrez le système et écoutez les bips du contrôleur : 9 bips > Défaut du contrôleur ; 10 bips > Défaut du capteur du moteur gauche : Contactez votre revendeur
	1 pause + 10 bips courts, avec l'icône de défaut allumée et le code numérique vert « 10 » affiché au centre de l'écran LCD	Défaut du capteur moteur droit	1. Vérifiez le câblage du moteur droit 2. Échangez les câbles des moteurs gauche et droit, redémarrez le système et écoutez les bips du contrôleur : 10 bips > Défaut du contrôleur ; 9 bips > Défaut du capteur du moteur gauche : Contactez votre revendeur


Protection de l'environnement

Ce produit est un appareil électrique et ses composants doivent être éliminés de manière appropriée en fin de vie afin d'éviter tout danger potentiel. Voici quelques consignes spécifiques : Batterie au lithium : Ne pas jeter au hasard. Les batteries usagées contiennent des ions de métaux lourds, susceptibles de polluer gravement l'environnement. Une mauvaise manipulation peut également entraîner des accidents tels que des explosions. Méthode d'élimination : Déposez les batteries usagées dans des centres de recyclage agréés ou dans des conteneurs dédiés

Visuels non contractuels

Visuels non contractuels

IV/ PARAMÈTRES TECHNIQUES

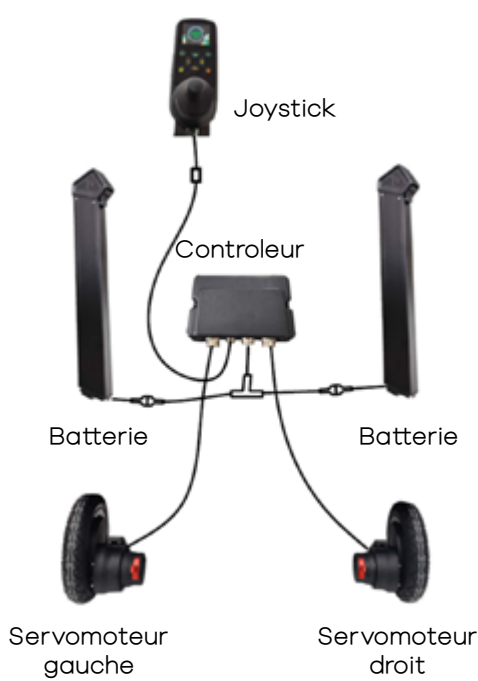

Voltage moteur	24VDC
Puissance	200W X 2
Batterie	TP-B7100A
Alimentation de charge	100V ~ 240V AC, 50/60 Hz
Puissance batterie	2 x 10,5Ah
Voltage batterie	2 x 24V
Courant de sortie Max	2A
Courant continu	5A
Indicateur de Voltage	LED
Chargeur de la Batterie	
Modèle	
ENTREE / INPUT	100-240V~1.5A 50/60Hz
SORTIE / OUTPUT	24V 2.0A

AVERTISSEMENT

1. Risque de blessure, chargez uniquement des batteries rechargeables de type LI-ION 24V, les autres types peuvent exploser. Il est impératif de n'utiliser que le chargeur de batteries Lithium fournies par ErgoConcept. L'utilisation de tout autre chargeur est formellement interdite.
2. Gaz explosifs. éviter les flammes et les étincelles. assurer une ventilation adéquate pendant la charge.
3. Débrancher l'alimentation avant d'établir ou de débrancher les connexions à la batterie.
4. Avant de charger lire les instructions.
5. Pour une utilisation en intérieur, ou ne pas exposer à la pluie.

Visuels non contractuels

Visuels non contractuels

X/ GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Élément	Durée de garantie	Remarque
Châssis	2 ans	Dégâts non délibérés dans le respect du présent guide d'utilisation
Moteur	2 ans	Dégâts non délibérés dans le respect du présent guide d'utilisation
Batterie Lithium	2 ans	Dégâts non délibérés dans le respect du présent guide d'utilisation
Contrôleur	2 ans	Dégâts non délibérés dans le respect du présent guide d'utilisation
Joystick	2 ans	Dégâts non délibérés dans le respect du présent guide d'utilisation

Pour faire valoir la garantie constructeur de votre fauteuil ERGO 08L 3.0, il est indispensable de prendre contact avec votre revendeur qui assurera les échanges avec ErgoConcept.



Merci pour votre confiance

35 rue du petit bois
Bâtiment D
69440 Mornant
FRANCE

www.ergoconcept.net