



Télécommande sans fil ERGO 08L 3.0


Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et le conserver correctement

1 Informations de sécurité


- Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute consultation ultérieure.
- Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne laissez pas ce produit tremper ou s'humidifier.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, ni l'immerger dans un liquide, ni laisser couler ou éclabousser de liquide dessus.
- Veuillez ne pas installer ni utiliser ce produit à proximité d'une source de chaleur (radiateurs, appareils de chauffage, poêles ou autres appareils générant de la chaleur).
- N'ouvrez pas et ne retirez pas le boîtier pour l'entretien sans autorisation. Quelle que soit la cause des dommages subis par ce produit, il doit être réparé par un technicien de maintenance qualifié, par exemple en cas d'éclaboussures ou de gouttes de liquide, d'exposition à l'humidité, de dysfonctionnement ou de chute.
- Avant d'essuyer et de nettoyer le produit avec un chiffon sec, veuillez l'éteindre et vous assurer qu'il est déconnecté de la commande du fauteuil roulant.
- N'utilisez pas de produits chimiques tels que des acides forts, des bases, de l'essence, de l'alcool, etc. pour nettoyer la surface du produit. Si un nettoyage est nécessaire, veuillez utiliser des solvants neutres ou de l'eau claire.
- Le signal radiofréquence à ondes courtes émis par les produits sans fil peut perturber le fonctionnement normal d'autres appareils électroniques. Veuillez éteindre ce produit dans les zones interdites.
- N'utilisez pas ce produit dans les établissements médicaux, les avions, les stations-service, à proximité des portes automatiques, des alarmes incendie ou d'autres dispositifs de commande automatique.
- N'utilisez pas ce produit à moins de 20 cm des stimulateurs cardiaques électroniques ou d'autres dispositifs médicaux, car les ondes radio peuvent perturber leur fonctionnement normal.
- Pour des raisons de sécurité et pour prolonger la durée de vie du produit, veuillez retirer la batterie lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée ou en cas d'orage.

2 Instructions d'utilisation

2.1 Description des fonctions de la télécommande

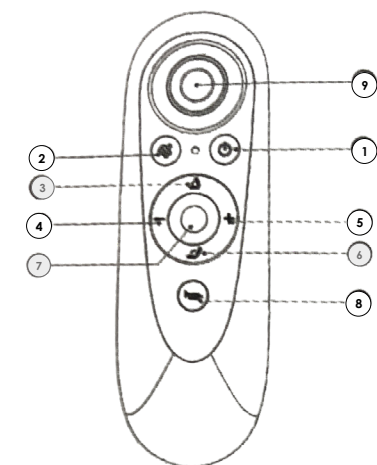

- ① Interrupteur marche/arrêt
- ② Bouton effacer
- ③ Bouton de pliage (non disponible)
- ④ Diminution de la vitesse
- ⑤ Augmentation de la vitesse
- ⑥ Bouton de dépliage (non disponible)
- ⑦ Bouton d'arrêt du pliage (non disponible)

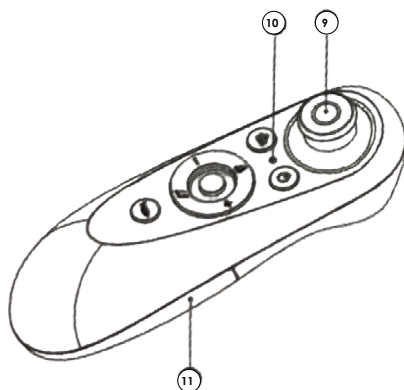

- ⑧ Klaxon
- ⑨ Joystick
- ⑩ Voyant lumineux
- ⑪ Emplacement des piles

2 Instructions d'utilisation

Interrupteur marche/arrêt : Appuyez sur le bouton ① et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde pour allumer ou éteindre la télécommande sans fil.

Diminution de la vitesse : Appuyez sur le bouton ④ pour diminuer la vitesse.

Augmentation de la vitesse : Appuyez sur le bouton ⑤ pour augmenter la vitesse.

Klaxon : Appuyez sur le bouton ⑧ et le klaxon continuera de sonner jusqu'à ce que vous le relâchiez.

Joystick : Contrôlez la direction du fauteuil roulant électrique à l'aide du joystick.

Voyant lumineux : Observez l'état de fonctionnement de la télécommande sans fil grâce au voyant lumineux.

Emplacement des piles : Ouvrez le couvercle du compartiment à piles pour installer ou remplacer la pile.

Bouton de pliage (non disponible) : Appuyez sur le bouton ③ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant de vitesse commence à clignoter, puis relâchez-le. Le véhicule se plie alors. Appuyez sur le bouton ⑦ pour arrêter le pliage.

Bouton de dépliage (non disponible) : Appuyez sur le bouton ⑥ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant de vitesse commence à clignoter, puis relâchez-le. Le véhicule se déplie alors. Appuyez sur le bouton ⑦ pour arrêter le dépliage.

Bouton d'arrêt (non disponible) : Appuyez sur le bouton ⑦ pour arrêter l'action.

2 Instructions d'utilisation

2.2 Indicateur LED

État de la télécommande sans fil	Couleur et état de l'indicateur LED
Mise en marche	Les voyants rouge et vert clignotent alternativement pendant 1 seconde
Mise hors tension	Le voyant rouge clignote rapidement pendant 1 seconde
État d'appairage	Clignote en continu en alternant rouge et vert
État de fonctionnement normal	Voyant vert clignotant lentement
Batterie faible	Voyant rouge clignotant lentement

2 Instructions d'utilisation

2.3 Appairage de la télécommande sans fil avec le joystick



1) Préparation avant l'appairage :

- Veuillez vous assurer que la télécommande sans fil et le joystick sont alimentés ; (Le voyant s'allume lorsque l'appareil est allumé)
- Assurez-vous que la télécommande sans fil est en état de marche normal.

2) Processus d'appairage automatique de la télécommande sans fil portable :

1. Allumez le joystick à appairer, puis appuyez longuement sur le bouton de diminution de vitesse  du joystick et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le joystick émet un son continu « Di Di ... », indiquant qu'il est en attente d'appairage ; (Le mode d'appairage est désactivé si vous relâchez le bouton)

2. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde pour allumer la télécommande sans fil, puis placez-la près du joystick. À ce moment-là, le voyant de la télécommande sans fil clignote alternativement en rouge et en vert, indiquant qu'elle est en cours d'appairage ; Jusqu'à ce que la télécommande émette trois bips courts « dididi », la vitesse passe à la vitesse 2 et le voyant d'état de la télécommande sans fil clignote lentement en vert, indiquant la fin de l'appairage automatique ;

2 Instructions d'utilisation

Après un appairage réussi, le fauteuil roulant ERGO 08L 3.0 peut être contrôlé pour la conduite et autres actions fonctionnelles à l'aide d'une télécommande sans fil. Si l'appairage échoue, il peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce qu'il réussisse.

3. Vérifier si l'appairage est terminé

- Appuyez doucement sur le joystick de la télécommande sans fil pour vérifier si le fauteuil roulant se déplace ;

- Mettez la télécommande sans fil sous tension puis hors tension une fois, et vérifiez si le contrôleur affiche un message de connexion réussie ;

- Utilisez les boutons « Diminuer la vitesse » et « Augmenter la vitesse » de la télécommande sans fil portable pour vérifier si le voyant de vitesse du contrôleur a changé ;


- Utilisez le bouton « klaxon » de la télécommande sans fil pour vérifier si le contrôleur émet un son.

Pour améliorer la capacité de veille de la télécommande sans fil, celle-ci s'éteint automatiquement après 35 secondes d'inactivité du joystick. Après la mise sous tension de la télécommande sans fil, si l'extrémité du contrôleur n'est pas détectée, attendez 35 secondes avant l'arrêt automatique. Si vous souhaitez contrôler à nouveau le fauteuil roulant, vous devez la rallumer.

Pour garantir un certain niveau de sécurité opérationnelle, lors de l'utilisation d'une télécommande sans fil pour contrôler un fauteuil roulant, la vitesse du fauteuil roulant électrique est automatiquement ajustée à la vitesse maximale en deuxième vitesse.

2 Instructions d'utilisation

2.4 Effacer l'historique d'appairage (Préparation d'un nouvel appairage)

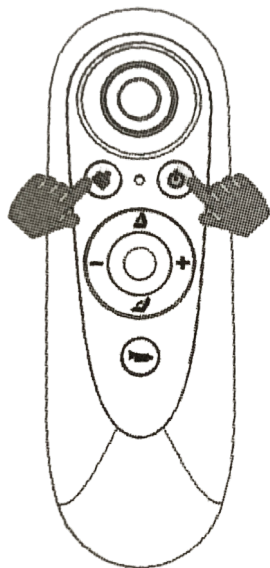

Éteignez l'interrupteur d'alimentation de la télécommande sans fil portable ;

Appuyez simultanément sur les boutons « Effacer » et « Marche/Arrêt » et maintenez-les enfoncés pendant plus de 3 secondes. Les voyants rouge et vert clignoteront 3 fois avant de se relâcher (si la télécommande du fauteuil roulant à appairer est allumée, elle s'y appairera automatiquement) ;

Une fois l'opération ci-dessus terminée, le voyant d'état clignote alternativement en rouge et vert, et l'appairage de la télécommande sans fil portable est effacé. Elle ne se connecte plus automatiquement à la télécommande d'origine. Appuyez longuement sur le bouton « Marche/Arrêt » pour éteindre la télécommande sans fil ;

Si l'effacement échoue, répétez l'opération jusqu'à ce qu'elle réussisse.

2 Instructions d'utilisation

2.5 Méthode d'installation des piles de la télécommande sans fil



Maintenez le couvercle de l'emplacement des piles enfoncé et tirez-le vers le bas. Déplacez et retirez le couvercle.



Installez 2 piles AAA dans le compartiment à piles. (Veuillez faire attention au sens positif et négatif des piles)



Placez le couvercle de la pile sur le compartiment à piles et clipsez-le complètement.

3 Service après-vente

1. Période et modalités de garantie : Si un dysfonctionnement survient dans les 18 mois suivant la date d'achat, la réparation sera gratuite. Si la période de garantie est dépassée, l'utilisateur devra prendre en charge les frais correspondants.

2. Pendant la période de garantie, si l'une des situations suivantes se produit, notre société facturera les frais de matériel et de main-d'œuvre, le cas échéant :

- Non-respect des instructions et dysfonctionnements ;
- Dommages causés par le consommateur suite à une utilisation, un transport, un entretien ou un stockage inappropriés ;
- Démontage par le consommateur causant des dommages ;
- Dommages causés par l'achat ou le remplacement par des pièces détachées non originales ;
- Dommages causés par un cas de force majeure tel que tremblements de terre, incendies, dégâts d'eau et incendie ;
- L'environnement d'utilisation du produit (y compris, mais sans s'y limiter, l'humidité, la température, l'altitude, etc.) dépasse significativement les exigences du manuel d'utilisation.

3. Si la période de garantie est dépassée et que la réparation est effectuée par notre société, celle-ci facturera les frais de matériel et de main-d'œuvre, le cas échéant.